

# Verlässlich

Von der weltweit meistverkauften Marke im Bereich der Schwangerschafts- und Fruchtbarkeitstests zur Heimanwendung.<sup>5</sup>

# Zuverlässig

Über 99 % zuverlässig<sup>6</sup>. Belegt durch umfangreiche klinische und F&E-Studien, die in unserem weltweit führenden Innovationszentrum im Vereinigten Königreich durchgeführt wurden.

# **T** Einfach

Alle unsere Produkte sind einfach anzuwenden, leicht abzulesen, komfortabel und hygienisch.

#### Innovativ

Dank mehr als 170 Verbraucherstudien und über 35 Jahren wissenschaftlicher Expertise sind unsere Produkte darauf ausgerichtet, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

## Sorgfältig

Unser sachkundiges Kundenbetreuungsteam steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns online unter www.clearblue.com

Basierend auf internationalen Verkäufen, zusammengestellt unter Verwendung unabhängiger Marktforschungsdaten (Daten in den Akten). Erkennung einer Schwangerschaft ab dem Fälligkeitstag der Periode zu über 99 % zuverlässig. 99 % zuverlässig bei der Erkennung des LH-Anstiegs.


Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung. Clearblue ist eine Marke der SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, ©2021, Alle Rechte vorbehalten, MKT-0808,4,DE

# Schwangerschaftstests

# Was passiert in Ihrem Körper?

1. Wenn eine Eizelle von einem Spermium befruchtet wird, nistet sie sich etwa 7–9 Tage nach der Befruchtung in der Gebärmutterschleimhaut (Uterus) ein.

#### Befruchtung einer Eizelle durch ein Spermium

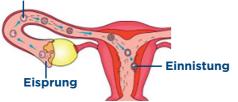

2. Nach der Einnistung kann das Schwangerschaftshormon humanes Choriongonadotropin (hCG) in Blut und Urin nachgewiesen werden. Anfangs sind die Werte sehr niedrig, so dass nur empfindlichste Tests eine Schwangerschaft erkennen können.



Die Werte beginnen schnell zu steigen und verdoppeln sich in den ersten Wochen etwa alle 24-48 Stunden.

#### **EINDEUTIG**

Das Lesen schwacher Linien kann schwierig sein: tatsächlich liest fast 1 von 3 Frauen Streifen- und Kassettenschwangerschaftstests falsch ab.<sup>7</sup>

Aus diesem Grund zeigt der Clearblue Ultra Frühtest Digital die Ergebnisse "Schwanger" oder "Nicht schwanger" in Worten an, damit beim Ablesen Ihres Ergebnisses kein Raten mehr nötig ist.

## **ULTRA SENSITIV, ULTRA FRÜH**

Der Clearblue Ultra Frühtest Digital basiert auf über 35 Jahren wissenschaftlicher Expertise und ist unser empfindlichster digitaler Schwangerschaftstest. Er weist sehr niedrige Werte des Schwangerschaftshormons hCG nach – **bis zu 6 Tage früher**.<sup>8</sup> Die Testempfindlichkeit beträgt 10 mIU/mI.



Der Clearblue Ultra Frühtest Digital verfügt außerdem über Funktionen, die die Anwendung erleichtern, z. B. Floodguard™-Technologie, Smart Countdown bis zum Ergebnis und eine breite Testspitze für eine einfache Probenaufnahme. Er ist außerdem der erste und einzige Test mit einem einzigartigen Stopp-Licht, das Ihnen anzeigt, wenn eine ausreichende Menge der Probe aufgenommen wurde.

<sup>7</sup>Pike J. *et al.* Expert Opinion on Medical Diagnostics. 2013:7(5); 435 <sup>8</sup>78 % der "Schwanger"-Ergebnisse können 6 Tage vor dem Ausbleiben der Periode erkannt werden. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Anwendung.  $^6 Alle$  Clearblue Tests weisen eine Zuverlässigkeit von über 99 % bei der Erkennung einer Schwangerschaft ab dem Fälligkeitstag der Periode auf.



Die gezeigten visuellen Ergebnisse dienen nur zur Veranschaulichung. Die Ergebnisse können abweichen. Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung.

Sergebnis in Wochen stimmte zu 197 % mit späterer Bestimmung des Empfängnisdatums durch Ultraschall überein. Basierend auf Studien mit 187 Frauen und auf einem Vergleich der Ergebnisse (1–2, 2–3, 3+ Wochen seit der Empfängnis) mit der Bestimmung des Empfängisdatums durch Ultraschall.

Wochen sett der Empfängnis) mit der Bestimmung des Empfängisdatums durch Ultraschall.

"Das Ergebnis "Schwanger" kann innerhalb 1 Minute angezeigt werden, wenn Sie ab dem Tag testen, an dem Ihre Periode ausbleibt. Warten Sie 3 Minuten, bis sich das Ergebnis "Nicht Schwanger" bestätigt.

Nr. 1
weltweit
meistverkaufte
Marke<sup>1</sup>

# Clearblue

Keine Marke ist genauer<sup>2</sup>

Erfahren Sie mehr und wählen Sie das für Sie am besten geeignete Produkt

Nr. 1 meistverkaufte Marke im Bereich der Schwangerschafts- und Fruchtbarkeitstests zur Heimanwendung. Basierend auf internationalen Verkäufen, zusammengestellt unter Verwendung unabhängiger Marktforschungsdaten (Daten in den Akten).
Erkennung einer Schwangerschaft ab dem Fälligkeitstag der Periode zu über 99 % zuverlässig. Über 99 % zuverlässig bei der Erkennung des LH-Anstiegs.

#### Fruchtbarer Zeitraum

Wussten Sie, dass fast 50 % der Paare zum falschen Zeitpunkt versuchen, schwanger zu werden?<sup>3</sup>

#### **Ermitteln Sie Ihre fruchtbarsten Tage**


Eine Frau kann nur an wenigen Tagen in ihrem Zyklus schwanger werden. Daher sollte bei Kinderwunsch der Geschlechtsverkehr an diesen Tagen stattfinden.

Ihre Fruchtbarkeit wird von Hormonen gesteuert. Eines dieser Hormone ist Östrogen. Der Östrogenspiegel steigt wenige Tage vor dem Eisprung an. Durch diesen Anstieg verändert sich die Konsistenz Ihres Zervixschleims, was zu einem spermienfreundlichen Milieu beiträgt, in dem Spermien überleben können.

Wenn Ihr Östrogenspiegel seinen Höhepunkt erreicht, löst er einen plötzlichen Anstieg des luteinisierenden Hormons (LH) aus. Dies bewirkt. dass die Eizelle circa 24 bis 36 Stunden später aus dem Eierstock freigesetzt wird (Eisprung).

#### Kann 4 oder mehr fruchtbare Tage identifizieren4

Der Clearblue Ovulationstest Fortschrittlich & Digital ist der bisher einzige Test, der 4 oder mehr fruchtbare Tage identifizieren kann<sup>4</sup>. Er prüft 2 wichtige Fruchtbarkeitshormone, Östrogen und luteinisierendes Hormon (LH), um Ihre Tage mit hoher und maximaler Fruchtbarkeit zu identifizieren, so dass Sie vorausplanen können und mehr Möglichkeiten haben, schwanger zu werden.

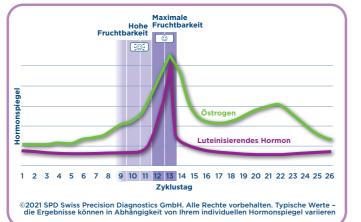

Dieses Beispiel zeigt, wann Tage mit geringer, hoher und maximaler Fruchtbarkeit in einem Zyklus auftreten können. Maximieren Sie Ihre Chancen, auf natürliche Weise schwanger zu werden, indem Sie an Tagen mit hoher und maximaler Fruchtbarkeit Geschlechtsverkehr haben

- Erkennung des LH-Anstiegs mit einer Zuverlässigkeit von mehr als 99 %
- Eindeutige digitale Ergebnisse
- Einfach in der Anwendung

#### Wie benutzt man den Ovulationstest Fortschrittlich & Digital?

- 1. Beginnen Sie den Test je nach Ihrer Zykluslänge
- Verwenden Sie zum Testen den ersten Urin nach Ihrem längsten Schlaf
- Der Tag, an dem Ihre Periode einsetzt (erster Tag des vollen Menstruationsflusses), ist Tag 1
- Wenn Sie Ihre Zykluslänge nicht kennen, ist es ratsam, einen Zyklus zu warten und die Zykluslänge zu notieren

e lange dauert Ihr Zyklus (Tage)?	21 oder weniger	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41 oder mehr
ginnen Sie den Test an dem Tag, r unter Ihrer Zykluslänge steht.	5	6	6	6	7	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20 Tage, bevor Sie Ihre nächste Periode erwarten

2. Entfernen Sie die Kappe des Teststäbchens



3. Führen Sie den Teststab in die Halterung ein und achten Sie darauf, dass die lilafarbenen Pfeile korrekt aufeinander ausgerichtet sind.



4. Halten Sie einfach die absorbierende Testspitze für 3 Sekunden in den Urinstrahl oder tauchen Sie sie für 15 Sekunden in eine aufgefangene Probe. Warten Sie 5 Minuten auf Ihr Ergebnis.







Hohe Fruchtbarkeit: Haben Sie Geschlechtsverkehr an Tagen mit hoher Fruchtbarkeit, um Ihre Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhöhen. Der Test zeigt weiterhin jeden Tag hohe Fruchtbarkeit an, bis der LH-Anstieg erkannt wird. Wiederholen Sie den Test am darauffolgenden Tag.



Maximale Fruchtbarkeit: Das ist Ihre fruchtbarste Phase. Der Smilev für Tage mit maximaler Fruchtbarkeit wird 48 Stunden lang konstant angezeigt und bestätigt Ihre 2 fruchtbarsten Tage. Wenn der erste Tag mit maximaler Fruchtbarkeit angezeigt wird, führen Sie in diesem Zyklus keinen weiteren Test durch. Die Testhalterung kann während dieser Anzeige keinen weiteren Test ablesen.

Jede Frau hat einen individuellen Zyklus und die Hormonmuste unterscheiden sich, daher ist die Anzahl der angezeigten fruchtbaren Tage individuell verschieden. In einer Studie mit 87 Frauen wurde Folgendes beobachtet:

Anzahl an Tagen mit hoher Fruchtbarkeit, die vor der maximalen Fruchtbarkeit angezeigt werden	% der Frauen			
0-4	66%			
5-9	25%			
10+	1%			
Keine maximale Fruchtbarkeit nach hoher Fruchtbarkeit erkannt	8%			
Gesamt	100%			

# Finden Sie heraus, welcher unserer Ovulationstests für Sie am besten geeignet ist

rtiment	Clearblue Ovulationstest Fortschrittlich & Digital  Ober 99 % zuverlässig  Clearblue  Gher 4 oder mehr  Fruchtbare Tage identifizieren  Kinderwunsch  Ovulationstest Fortschrittlich & Digital	Clearblue Fertilitätsmonitor Advanced  Zu 99 % zuverlässig  Erhöht nachweislich de Chancen auf eine Schwangerschaft um 89 %							
achgewiesene ormone	LH & Östrogen – der einzige Test, der 2 wichtige Fruchtbarkeitshormone nachweist	LH & Östrogen – testet auch auf Schwangerschaft							
nzahl der kannten Ichtbaren ge	in der Regel 4 oder mehr Tage <sup>4</sup> – der einzige Ovulationstest, der mehr fruchtbare Tage identifizieren kann.	In der Regel bis zu 6 Tage – entwickelt, um alle Ihre fruchtbaren Tage zu erkennen							
gitale gebnisse – ine deutlichen nien	Gering Hoch Maximal	Gering Hoch Maximal							
nzahl der ststäbchen in ner Packung	10	1 Monitor Teststäbchen separat erhältlich (20 Fruchtbarkeitstests und 4 Schwangerschaftstests)							
nwangerschaftstest	Nein	Ja							

**Genauigkeit von mindestens 99 % beim Erkennen eines LH-Anstiegs** 

Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung

 $<sup>^4</sup>$ In einer in Großbritannien durchgeführten Studie mit 87 Frauen wurden in 80 % der Zyklen anhand der tatsächlichen Zykluslänge 4 oder mehr fruchtbare Tage